

SET DE CONTROLES PK PYRUVATE KINASE

REF

113

LOT

113-18041



UTILISATION PREVUE

Le Contrôle PK est à utiliser afin de contrôler les performances du kit BIOSENTEC de dosage de l'activité enzymatique PK #063. Elle permet de réaliser un Contrôle Haut ainsi qu'un Contrôle Bas.

RECONSTITUTION ET DILUTION

Avant utilisation, les contrôles sous forme lyophilisée doivent être redispersés dans le tampon de dilution fourni.

0.274 U/ flacon (+/- 0.027)

PK lyophilisée – contrôle Haut

Pour réaliser un contrôle Haut :

- Introduire dans le flacon **500 µL** de tampon de dilution.
- Remuer lentement jusqu'à complète dissolution.
- Homogénéiser par aspiration / refoulement.

0.553 ± 0.083 U/mL à 37°C

PK lyophilisée – contrôle Bas

Pour réaliser un contrôle Bas :

- Introduire dans le flacon **2000 µL** de tampon de dilution.
- Remuer lentement jusqu'à complète dissolution.
- Homogénéiser par aspiration / refoulement.

0.136 ± 0.020 U/mL à 37°C