

SET DE CONTROLES G6PDH GLUCOSE-6-PHOSPHATE DESHYDROGENASE

REF

116



LOT

116-18031

UTILISATION PREVUE

Le Contrôle G6PDH est à utiliser afin de contrôler les performances du kit BIOSENTEC de dosage de l'activité enzymatique G6PDH #064. Elle permet de réaliser un Contrôle Haut ainsi qu'un Contrôle Bas.

RECONSTITUTION ET DILUTION

Avant utilisation, les contrôles sous forme lyophilisée doivent être redispersés dans le tampon de dilution fourni.

0.239 U/ flacon (+/- 0.024)

G6PDH lyophilisée – contrôle Haut

Pour réaliser un contrôle Haut :

- Introduire dans le flacon **500 µL** de tampon de dilution.
- Remuer lentement jusqu'à complète dissolution.
- Homogénéiser par aspiration / refoulement.

0.472 ± 0.071 U/mL à 37°C

G6PDH lyophilisée – contrôle Bas

Pour réaliser un contrôle Bas :

- Introduire dans le flacon **2000 µL** de tampon de dilution.
- Remuer lentement jusqu'à complète dissolution.
- Homogénéiser par aspiration / refoulement.

0.121 ± 0.018 U/mL à 37°C